



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAMILLA PLEGABLE CONVERTIBLE

FT1192

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE
USO Y MONTAJE IMPORTANTES.
POR FAVOR, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

INFORMACIÓN GENERAL Y DE SEGURIDAD

Para su seguridad, lea, comprenda y siga la información proporcionada con y sobre esta camilla plegable. El propietario y el operador deben comprender este producto y los procedimientos de operación seguros antes de intentar usarlo. El propietario y el operador deben ser conscientes de que el uso de este producto puede requerir habilidades y conocimientos especiales. Las instrucciones y la información de seguridad se deben transmitir en el idioma nativo del operador antes de que se autorice el uso de este producto.

- Asegúrese de que el operador comprenda completamente los peligros inherentes asociados con el uso y el mal uso del producto. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro y adecuado de este producto, retírelo del servicio inmediatamente.
- Inspeccione antes de cada uso. No lo use si tiene piezas rotas, dobladas, agrietadas o dañadas (incluidas las etiquetas). Cualquier camilla plegable que parezca dañada de alguna manera o que funcione de manera anormal se debe retirar del servicio inmediatamente. Si la camilla plegable ha estado sujeta a una carga de impacto (una carga que cayó sobre ella de manera inesperada y repentina), deje de usarla inmediatamente hasta que un centro de servicio autorizado la haya inspeccionado. Se recomienda que personal calificado realice una inspección anual.
- Las etiquetas y los manuales del operador están disponibles a través del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Este dispositivo está diseñado para plegarse en forma de “Z” para su uso como asiento de mecánico o desplegarse para su uso como camilla de mecánico. Está diseñado para soportar y mover, sobre una superficie lisa y nivelada, cargas de capacidad nominal que consistan en una sola persona que no pese más de 110 Kg con el fin de realizar mantenimiento o servicio automotriz. Este dispositivo no está diseñado ni concebido para ser utilizado con ningún otro fin.

Capacidad nominal: una persona (incluye herramientas, equipos y artículos personales) que pese 110 kg o menos.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	Medidas caja	Peso
150 kg	66x42x12 cm	8.5

ADVERTENCIA: No utilice este dispositivo para ningún otro fin que no sea aquel para el que está expresamente destinado.

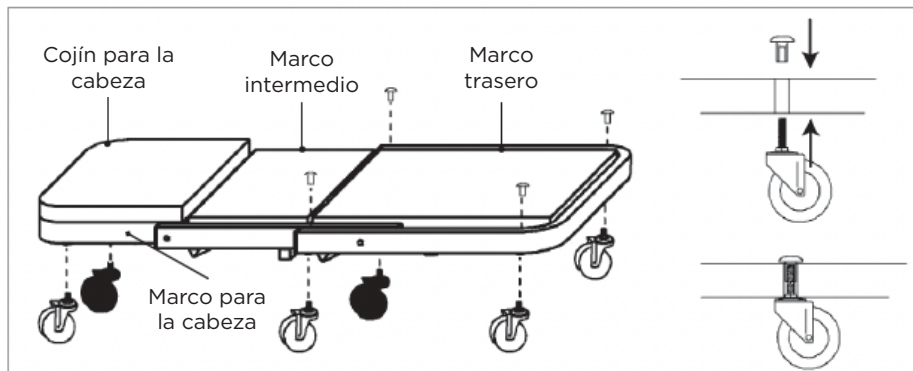

PRECAUCIÓN:

Los componentes plegables pueden presentar peligro de aplastamiento o aplastamiento durante el uso de este producto. Tenga cuidado al realizar ajustes y esté siempre alerta y sobrio al ensamblar y usar este equipo.

¡ADVERTENCIAS!

- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
- No exceda la capacidad nominal. La capacidad nominal es de 110 kgs (incluye usuario, herramientas, equipo y artículos personales).
- Siéntese con cuidado. Evite cargas de impacto causadas por saltos o caídas sobre el asiento.
- No se pare sobre el asiento.
- Tenga cuidado con los peligros de aplastamiento y aplastamiento al plegar y desplegar el dispositivo.
- ¡Manténgalo fuera del alcance de los niños! Este dispositivo no es apropiado para el uso de los niños.
- Úselo únicamente sobre una superficie dura y nivelada capaz de soportar la carga.

PREPARACIÓN

Antes de ensamblar su camilla plegable, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni usar el producto. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Contenido del paquete: 1 sección del marco de la cabeza, 1 sección del marco medio, 1 sección del marco trasero, 4 pernos hexagonales, 8 arandelas, 4 tuercas hexagonales, 6 ruedas, 4 sujetadores de ruedas.

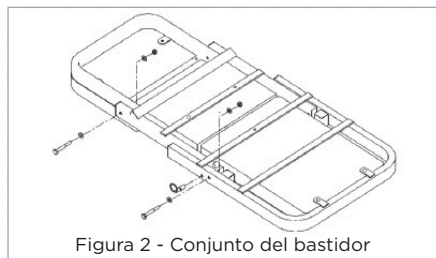


Figura 2 - Conjunto del bastidor

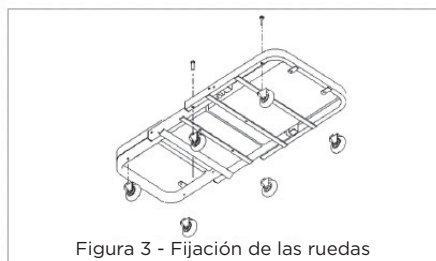


Figura 3 - Fijación de las ruedas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque las secciones del asiento boca abajo, dispuestas como se muestra en la Fig. 2 (tenga en cuenta la orientación de la sección central).
2. Conecte las secciones del asiento con pernos hexagonales, arandelas y tuercas. Apriete las tuercas firmemente, pero no lo suficiente como para bloquear el ajuste del asiento.
3. Inserte el pasador de bloqueo en el orificio del costado del marco. Verifique que funcione correctamente.
4. Con la llave de boca incluida, coloque dos ruedas en los orificios roscados en la sección del marco de la cabeza. Use una llave hexagonal de 5 mm para sujetar las cuatro ruedas restantes al marco del asiento. Inserte los sujetadores roscados desde la parte superior y las ruedas desde la parte inferior, luego ajuste con la llave hexagonal.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Desbloquee el pasador de bloqueo con resorte tirando hacia afuera hasta que se desenganche; al mismo tiempo, gire el marco de la cabeza y el marco central hacia arriba y hacia atrás en dirección a la sección del marco trasero hasta que el pasador de bloqueo pueda enganchar el manguito de bloqueo del asiento del asiento (Fig. 4). Asegúrese de que el pasador de bloqueo esté completamente enganchado.

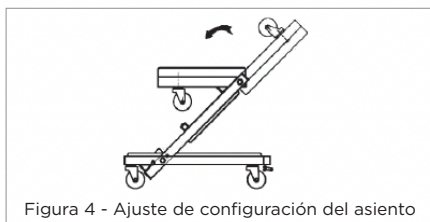


Figura 4 - Ajuste de configuración del asiento

2. Gire el marco de la cabeza hacia adelante hasta que quede en posición horizontal.
3. Desbloquee el pasador de bloqueo con resorte tirando hacia afuera hasta que se desenganche y luego invierta los pasos 1 y 2 para convertir el asiento.

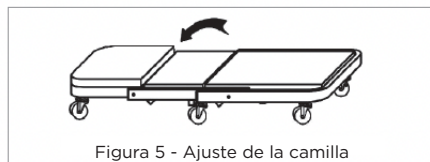


Figura 5 - Ajuste de la camilla

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana
XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China
Fabricado por: WT Co., Ltd

